

Добавка цефокситиновая MRSA
Cefoxitin MRSA Supplement**Кат. № 6069**
Фасовка 10 флаконов (каждый на 500 мл среды).
Хранить при температуре 2–8°CДобавка для выделения метициллин-устойчивых *Staphylococcus aureus***ФОРМУЛА (СОДЕРЖАНИЕ В 1 ФЛАКОНЕ)**

Цефокситин - 2 мг

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В стерильных условиях растворить содержимое 1 флакона в 5 мл теплой стерильной дистиллированной воды. Осторожно перемешать до полного растворения и асептически добавить к 500 мл *Агара хромогенного MRSA (кат. № 1423)*, автоклавированного и охлажденного до 50°C. Тщательно перемешать и разлить в стерильные емкости.

ПРИМЕНЕНИЕ

В клинической диагностике может использоваться любой тип образца.

- Инокулировать на поверхность параллельными штрихами.
- Инкубировать чашки в аэробных условиях при 35±2°C в течение 24-48 часов.
- Считать и интерпретировать результаты.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Инкубирование: 35±2°C / 24–48 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет колонии |
|---|--------------|---------------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Ингибируется | – |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Ингибируется | – |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 43300 | Хроший | Синий |